

steller Vision Mix



- » Präsentationen folgen
- » Tafelbilder erkennen
- » Buchtexte vergrößern
- » Hausarbeiten schreiben

*Auch mit dem
eigenen Notebook.*



steller Vision Mix

Eigenes Notebook nutzen

Beim **steller Vision Mix** wird bewährte steller Technik mit einem den individuellen Vorstellungen entsprechenden Notebook kombiniert. Dazu wird die steller Vision Software, welche u. a. die Darstellung in Graustufen, Echt- oder Falschfarben regelt, installiert und der Computer mit einer dreh- und schwenkbaren Kamera der steller-PK6-Serie ergänzt. Mit dieser können sowohl Präsentationen als auch Buchtexte problemlos vergrößert werden.



Mit eigenem Notebook kombinieren

Bedienung undameratechnik

Die Bedienung ist einfach und erfolgt intuitiv. Mit der Vision Software wird das Farbschema, die Vergrößerung, die Schärfe und der Kontrast über Tastatur, Maus oder Touchscreen geregelt. Eigene Profile können gespeichert und schnell abgerufen werden. Die Kamera PK6 kann am Stativ in nahezu jede beliebige Position gedreht und geneigt werden. Mit einer klappbaren Linse deckt sie sowohl den Nah- als auch den Fernbereich ab. Optional kann eine zusätzliche Minikamera angeschlossen werden. Dadurch entfällt das Umschalten zwischen Fern- und Nahbereich. Mit der optional erhältlichen steller Cooperator Software können die Dokumente mittels Kamera auch eingescannt sowie am Notebook vorgelesen und bearbeitet werden.



Darstellung der Vergrößerung in Falschfarben



Kamera PK6 mit Tischstativ



Minikamera MK1 mit Handstativ

steller Vision Mix

Viele Kombinationsmöglichkeiten

Das Grundsystem **steller Vision Mix** besteht aus der steller Vision Software, einer Kamera der PK6-Serie mit Stativ und einem, den individuellen Vorstellungen entsprechendem, Notebook. Das kann auch das bereits vorhandene Gerät von Zuhause sein. Die Kamera PK6 kann wahlweise mit einem Tischstativ oder einem Magnetschwenkarm kombiniert werden. Wird das **steller Vision Mix** mit einer Minikamera ausgestattet, kann diese an einer Magnetschiene befestigt oder mit einem Handstativ zum besseren Lesen benutzt werden. Mit einer zusätzlichen Akku Extension erhöht sich die Betriebsdauer um bis zu zehn Stunden.



Minikamera MK1 an Magnetschiene

Optional kombinierbar



Magnetschwenkarm



Akku Extension



Handstativ mit Minikamera MK1

steller Vision Mix

steller Vision Mix im Überblick

Autofokus	ja	
Farbmodi	Echtfarben, Graustufen, Falschfarben	
Bedienung	Tastatur, Maus oder Touchscreen (je nach Gerät)	optional: steller Control
Auflösung	HD	optional: Full HD
Ausstattung	eine Kamera der steller-PK6-Serie, Tasche für Tablet, Stromkabel	Optional kann eine Minikamera der steller-MK1-Serie kombiniert werden.
Stativ	Tischstativ oder Magnetschwenkarm	Magnetschiene bzw. Handstativ für die Minikamera MK1
Vergrößerung	Nah- oder Fernbereich durch Schwenken und Neigen der Kamera	Mit einem Zwei-Kamera-System kann der Nah- und Fernbereich gleichzeitig erfasst werden.
Stromversorgung	Lithium-Ionen-Akku	Optional kann das System mit ei- ner Akku Extension erweitert und so bis zu zehn Stunden kabellos betrieben werden.
Software	steller Vision	optional: steller Cooperator

steller Vision Mix individuell – Ihr persönliches System

.....

.....

.....

.....

.....

.....