



Dolphin  
**SuperNova**

30 Tage  
Testversion innen



Bildvergrößerung  
für Menschen mit  
schlechter Sicht

Der weltweit erste und beste kombinierte  
Bildschirmvergrößerer und Screen Reader,  
der beispiellosen Zugriff auf Windows-  
Tablets, Laptops und Desktops bietet.

Lieferbar in 3 auf Ihr Sehvermögen  
abgestimmten Editionen:

- ★ Bildschirmvergrößerung
- ★ Bildschirmvergrößerung mit Sprachunterstützung
- ★ Bildschirmvergrößerung mit Screen Reader



Besuchen Sie uns auf:

[YourDolphin.com](http://YourDolphin.com)

 **Dolphin**  
Assistive technology for life

Holen Sie sich Ihre kostenlose 30-Tage-Testversion

## DURCHSTARTEN MIT SUPERNOVA

### Keyboard controls for SuperNova

#### Allgemeine shortcuts für SuperNova



Drücke **Strg** mit folgenden Tasten:

+ SHIFT + S Startet SuperNova

+ SHIFT + D Startet Demo (nur in älteren Versionen)


+ LEERTASTE Öffnet das Bedienungsfeld

#### Schnelles Scannen & Lesen



Drücke Festelltaste mit folgenden Tasten:

+ O schneller Scan

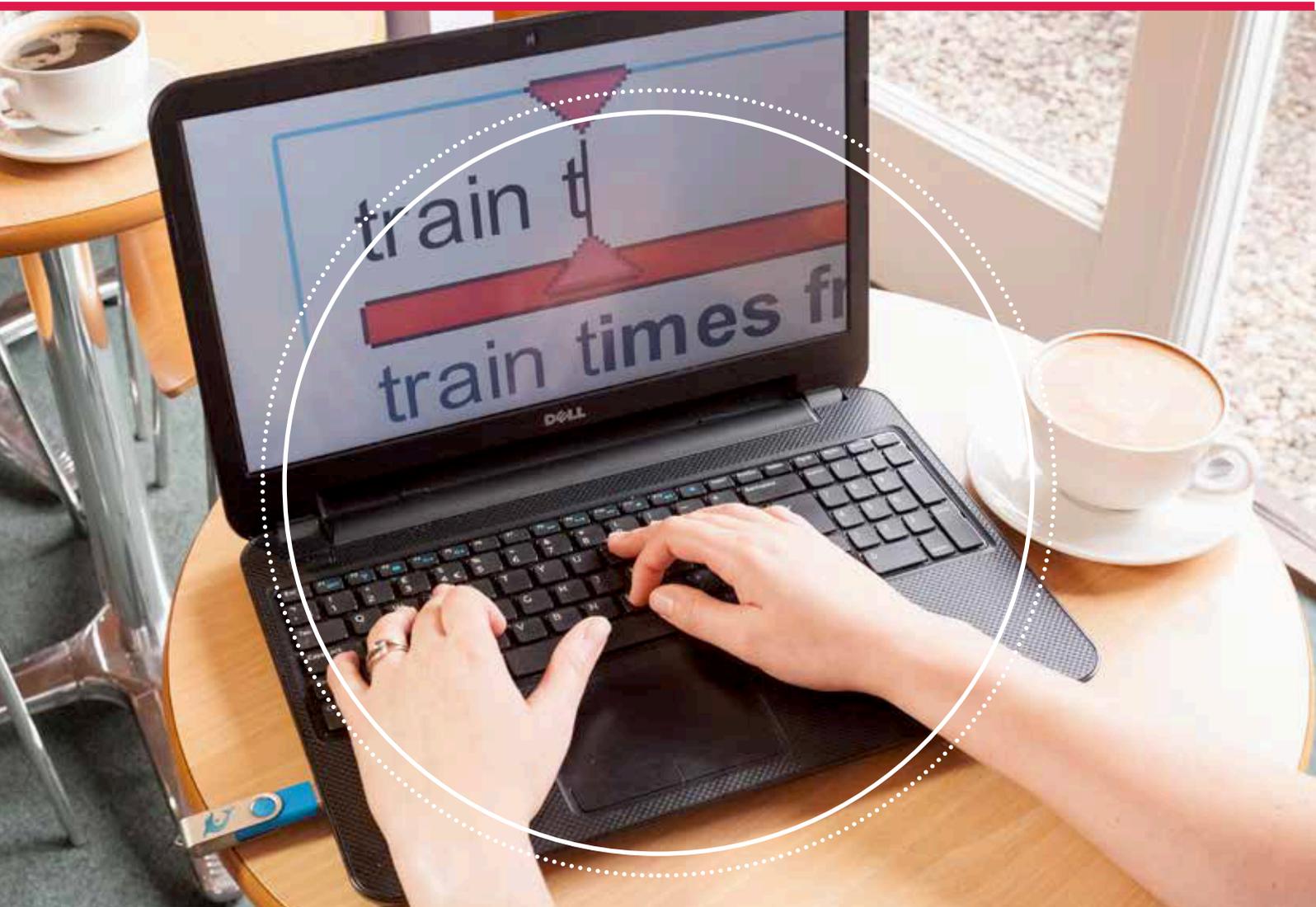

# ERHÄLTICH IN 3 VARIANTEN, UM IHREN BEDÜRFNISSEN GERECHT ZU WERDEN



für kristallklare  
Vergrößerung


Unabhängig von der Beschaffenheit Ihrer Augen werden Text oder Bilder mit SuperNova Magnifier kristallklar dargestellt und sind einfach zu lesen. Es vergrößert das Lesematerial auf die Größe, die Sie benötigen. Modifizieren Sie den Kontrast durch die verschiedenen Farbschemata und Markierungen für Ihre individuellen Bedürfnisse. Erleben Sie eine hervorragende Vergrößerung, gesteuert durch Touchscreen-Bedienung sowie die Nutzung auf mehreren Monitoren.



mit Sprachausgabe zur  
Verbesserung Ihrer Produktivität

Verbessern Sie Ihre Produktivität mit Hilfe der Sprachausgabe von SuperNova Magnifier & Speech - ideal für müde Augen. Schalten Sie die Sprachausgabe mit menschlich klingender Stimme an und hören, was Sie schreiben; der Vergrößerung auf dem Monitor folgend.

Es gibt keinen Grund sich durch übervolle Webseiten oder lange Dokumente zu kämpfen. Nutzen Sie einfach die Sprachausgabe auf Knopfdruck.

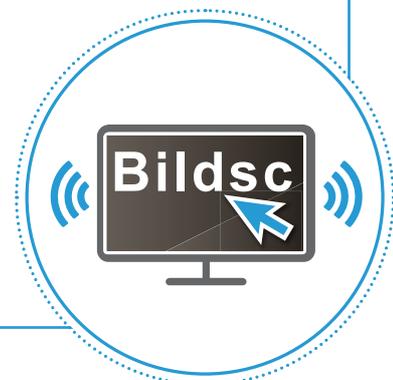

der Bildschirmleser für  
den ultimativen Zugang

SuperNova Magnifier & Screen Reader ist komplett flexibel und somit optimal für Organisationen, die mehrere Benutzer unterstützen wollen oder für Personen, deren Sicht sich über die Zeit verändert. Erhöhen Sie die Genauigkeit mit dem Vollbild-Screen Reader, der so viele Details spricht, wie Sie es benötigen. Mit dem Ziel, dass Ihre Dokumente und Emails einen guten Eindruck machen. Noch ein Vorteil: SuperNova unterstützt eine große Anzahl an Braille-Displays.



# 5 GRÜNDE SICH FÜR SUPERNOVA ZU ENTSCHEIDEN...

## SuperNova USB

Entscheiden Sie sich für SuperNova USB und haben Sie die sofortige Vergrößerungsoption immer mit dabei!

Der „Gäste-Modus“ benötigt keinerlei Installation und ermöglicht sofortige Vergrößerungs-, Farb-, Markierungs-, Sprach- und Braille-Funktionen und mehr - ohne großen Aufwand!



## Verbinden & Starten

Durch das Anschließen einer Kamera verwandelt SuperNova Connect&View Ihr Tablet, Laptop oder Ihren Desktop Computer in ein leichtes, transportables Bildschirmlesegerät.



## Scannen & Lesen

Anders als andere Programme beinhaltet SuperNova eine OCR-Funktion (Texterkennung), die es Ihnen ermöglicht Ihre Post, Bedienungsanleitungen und vieles mehr zu scannen und zu lesen.



## Intuitive Vergrößerung mit Touchscreen

Mit SuperNova haben Sie eine hervorragende Vergrößerungsfunktion mit Touchscreen-Bedienung, die sich so verhält, wie Ihre Finger es vorgeben.



## Zugang zu tausenden von Büchern

Genießen Sie den Zugang zu Ihren Lieblingsbüchern in internationalen Bibliotheken wie Gutenberg und SBS.



## Touchscreen Gesten



1 Fingerwisch	Bewegt Lupe auf dem Bildschirm
1 Drücken und halten	Spricht Text bei deinem Finger
2 Finger auseinanderziehen	Erhöht Vergrößerung
2 Finger zusammenziehen	Verringert Vergrößerung
3 Fingertip	Zeigt/Versteckt SuperNova Touch Bar
3 Fingerdoppeltip	Vergrößerung An/Aus

## Vergrößerung



Drücke LINKE  mit folgenden Tasten:	
+ NUMPAD ENTER	Vergrößerung An/Aus
+ NUMPAD PLUS	Größer
+ NUMPAD MINUS	Kleiner
+ NUMPAD 7	Wechselt Vergrößerungsansicht
+ NUMPAD 0	Farbschema An/Aus

## Vorlesen



Anfang 	Sprichstimme
Drücke LINKE  mit folgenden Tasten:	
	Vorlesen stoppen (stumm)
+ 0	Stimme An/Aus
+ ß	Schneller
+ LINKES SHIFT + ß	Langsamer

## Blindenschrift



Drücke LINKE  mit folgenden Tasten:	
+LINKES SHIFT +0	Blindenschrift An/Aus

## Mehrere Bildschirme



Drücke Festelltaste mit folgenden Tasten:	
+ MITTLERE MAUSTASTE	Wechselt Monitor

## SUPERNOVA- EDITIONEN VERGLEICHEN:

Bildschirm-  
vergrößerung

Bildschirm-  
vergrößerung  
mit  
Sprachunter-  
stützung

Bildschirmver-  
größerung mit  
Screen Reader

1.2 bis 64 Mal Vergrößerung	Ja	Ja	Ja
Touchscreen Vergrößerung	Ja	Ja	Ja
Farben & Hervorhebungen	Ja	Ja	Ja
Multiple Monitor Unterstützung	Ja	Ja	Ja
Vergrößern und lesen in Komfort	Ja	Ja	Ja
Verbinden & Anzeigen	Ja	Ja	Ja
Medien und Buchzugang	Ja	Ja	Ja
Scannen und lesen	Nein	Ja	Ja
Menschlich klingende Sprechweise	Nein	Ja	Ja
Dolphin Cursor	Nein	Ja	Ja
Screen Reader	Nein	Nein	Ja
Braille Display Support	Nein	Nein	Ja

Für Verkauf oder Support wenden Sie sich bitte an Ihren  
lokalen SuperNova-Agenten:

**steller**  
technology  wieder Sehen  
macht Freude

Steinbruchweg 9  
D-06198 Salzatal OT Lieskau

Telefon: 0345/55 88 00

Telefax: 0345/55 88 051

Internetadresse: <http://www.steller-technology.de>

E-Mailadressen: [info@steller-technology.de](mailto:info@steller-technology.de)