

Allgemeine SuperNova Tastenbefehle

SuperNova Steuerung

links
Strg

+

Leertaste

Vergrößerung - Tastenbefehle

Vergrößerung an/aus

links
Strg

+

Num Feld
Enter

Größer (Zoom in)

links
Strg

+

Num Feld
Plus

Kleiner (Zoom out)

links
Strg

+

Num Feld
Minus

Farbschema an/aus

links
Strg

+

Num
Feld 0

Sprache - Tastenbefehle

Sprache an/aus

links
Strg

+

0

Start/stop für lesen

Num Feld
Plus

Sprache schneller

links
Strg

+

links
Shift

+

=

Sprache langsamer

links
Strg

+

links
Shift

+

-

Akkustand

links
Strg

+

links
Shift

+

Num Feld
Plus

Leertaste

Allgemeine Touchscreen Gesten

Bewegt die Vergrößerung über den Bildschirm 1 Finger in eine Richtung schieben 	Spricht Text an der Fingerposition 1 Finger tippen und halten (nicht im SuperNova Magnifier) 
Größer (Zoom in) 2 Finger auseinander 	Kleiner (Zoom out) 2 Finger zusammen 
SuperNova Bedienfeld an/aus 3 Finger Einmaltipp 	Vergrößerung an/aus 3 Finger Doppeltipp 

Connect & View Tastenbefehle

	Connect & View an	Alt + Num Feld Enter
	Farbschema wechseln	Strg + 0
	Bild drehen	Strg + Num Feld 7
	Foto machen	Caps Lock + P
	Text scannen	Caps Lock + 0
	Start/stop OCR-Text lesen	Leertaste

steller-technology GmbH & Co. KG
Steinbruchweg 9
06198 Salzatal OT Lieskau
Tel: 0345 558800
Mail: info@steller-technology.de

steller
technology  wieder Sehen
macht Freude